

# Thermomètre frontal infrarouge

(mode d'emploi simplifié en français( [www.thermolab.ch](http://www.thermolab.ch))

Ce thermomètre frontal numérique sans contact est destiné à la mesure intermittente de température corporelle humaine chez les personnes de tous âges.

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR L'UTILISATION FRONTALE** - Appuyez sur  pour mettre l'instrument sous tension. Tenez l'instrument à moins de 4 cm du centre du front et maintenez enfoncé «Start» jusqu'à ce que vous en entendiez un bip (sauf en cas de sourdine) pour indiquer que la lecture est terminée. Les lectures devraient prendre environ une seconde. L'instrument s'éteint automatiquement après 60 secondes. Eteignez

manuellement l'instrument en appuyant sur la touche  et en la maintenant enfoncée pendant cinq secondes.

La température affichée est la valeur «équivalente orale». Si la température est supérieure à 37,5 ° C (99,5 ° F), vous entendrez trois bips courts suivis d'un long bip.

**POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS** - Gardez la zone du front propre. Ne pas prendre la température sur de la sueur, des cosmétiques et des cicatrices.

Veuillez rester dans un environnement stable pendant cinq minutes et éviter faire de l'exercice, prendre un bain ou prendre une douche pendant 30 minutes, ce qui peut augmenter artificiellement votre température.

## Spécifications techniques

Gamme de température mode frontal	24 à 42.2°C
Gamme de température mode de surface	-22°C à + 80°C
Température d'utilisation	-20 à +40°C
Température de stockage	-20°C à °50°C
Température de transport	max 70°C et 95%HR
Pression atmosphérique	800 à 1013 hPa
Précision mode frontal	+/- 0.2°C entre 35 et 42°C
Précision mode surface	+/- 0.3°C entre 22 et 42°C autrement +/- 2°C
Résolution	0.1°C
Unité	°C /°F
Temps de réponse	1 seconde
Auto-off	60 secondes
Piles	2 x 1.5 volts AAA- 3000 heures
Dimensions	402x48-x158mm
Poids	100 grammes
Temps de vie de l'appareil attendu	Env 4 ans
Classification poussière	IP22

Température frontale	<p>Cet instrument a été conçu pour un usage personnel. Ce n'est pas destiné à remplacer une visite chez le médecin. Veuillez comparer les résultat de la mesure à votre température corporelle normale. Consulter avec votre médecin si vous avez des problèmes de santé</p> 	
Température De surface	<p>Le mode Surface affiche la température de surface réelle et non ajustée donc qui est différente de la température corporelle. Pour sélectionner la température « mode surface », appuyer et maintenir  tout en appuyant sur « Start» Vous verrez le sur l'écran  Appuyez et maintenez «Start» pour mesures de surface en continu</p>	
Alerte haute température	<p>Si le thermomètre détecte une température de plus de 37.5°C en utilisant le mode frontal, vous entendrez 3 courts BIP suivi d'une long bip.</p>	
Fonction mémoires	<p>Vous pouvez mémoriser les dernières 25 lectures de température. Pour accéder à la mémoire, mettre sous tension  le thermomètre. Les lectures mémorisées seront affichées avec un insigne indiquant M. Pressez à nouveau sur le bouton  pour avancer à la lecture suivante.</p>	
Switch °C/°F	<p>l'instrument doit être éteint. Appuyez et maintenez START pendant environ 3 secondes alors que vous pressez uniquement une fois sur . L'icône passera de °C à °F. Refaire la procédure à nouveau pour revenir à °C</p>	
Le son	<p>Par défaut, le son est mis. Pour enlever le son, pressez et maintenez le bouton  (bouton on/off) pendant 3 secondes. L'icone du son flashera sur l'écran et l'instrument ne sonnera plus, Si vous désirez remettre à nouveau le son, pressez à nouveau pendant 3 secondes sur le bouton ON/OFF</p>	
Les piles	<p>Quand l'icone « low battery » flashe, les piles doivent être remplacées immédiatement par 2 piles AAA, 1.5 volts. Insérer les piles dans le sens correct de la polarité</p>	
Er 1 Er 3	<p>Er1 s'affiche si les mesures de température se prennent avant que l'instrument soit stabilisé. Er3 s'affiche si la température ambiante n'est pas comprise entre 10°C et 40°C. Il est important que le thermomètre soit stabilisé env 15 minutes à température ambiante avant de prendre des mesures.</p>	
Er	<p>Erreur 5-9 s'affichent pour tous les autres messages d'erreur. Il est nécessaire de faire « reset » au thermomètre. Pour faire « reset » au thermomètre, éteindre en pressant sur le bouton  et enlever les piles au moins pendant 2 minutes. Remettre les piles et pressez à nouveau sur le bouton ON. Si le message persiste, contactez-nous.</p>	
Hi ou Lo	<p>« Hi » ou « Lo » s'affichent lorsque la température mesurée est en dehors de la plage de mures. En mode frontal, la température est plus basse que 34°C ou plus haute que 42°C. En mode surface, Hi ou Lo s'affichent si la température est plus basse que 22°C ou plus élevée que 80°C</p>	